

# MANUEL D'UTILISATION **PUNCH DE BARRON POUR CORNEE DONNEUR**

Pour greffes de cornée  
Support à usage unique,  
prêt à l'emploi pour cornée donneur



**Bloc De Coupe**

**Trephan Donneur**

## **TECHNIQUE CHIRURGICALE**

Le support pour cornée-donneur ne peut être utilisé que par un chirurgien maîtrisant la transplantation cornéenne et connaissant parfaitement ce matériel. Les instructions qui suivent ne concernent pas le détail des procédures de la transplantation cornéenne.

- 1) Vérifiez le diamètre du trépan, gravé au sommet du support et retirez l'élastique
- 2) En tenant le bloc base avec une main, tirez le support du trépan vers le haut, avec l'autre main. Retournez-le et placez-le sur une compresse stérile. Jetez l'anneau blanc.
- 3) Afin de marquer les quatre cadrans sur la surface épithéliale de la cornée du donneur, placez la pointe du marqueur stérile dans chacun des quatre trous du bloc support. Faites pivoter le marqueur plusieurs fois jusqu'à ce que chaque trou soit bien imprégné de violet gentiane.
- 4) Placez la cornée du donneur sur le bloc de coupe, la surface endothéliale vers le haut. Retirez le tissu scléral pouvant dépasser de la cuvette du bloc de coupe. Centrez la cornée à l'aide d'une pince à dents très fines.
- 5) Placez le bloc de coupe sur une surface plate et stable. Insérez le trépan à l'aide des quatre guides dans les trous correspondants sur le bloc de coupe et pressez dessus fermement avec le pouce.
- 6) Tout en maintenant le bloc de coupe, soulevez et retirez le trépan. Habituellement, le greffon reste au fond de la cuvette et l'anneau cornéo-scléral est entraîné avec le trépan. Si le greffon reste adhérent au trépan, on peut le déloger aisément en injectant un peu de solution saline (BSS) ou une substance viscoélastique sur la face endothéliale du greffon par le trou central du trépan.

## **ATTENTION**

Avant toute intervention, le chirurgien doit avoir parfaitement assimilé toute la procédure concernant cette instrumentation

## **IMPORTANT**

Le support pour cornée-donneur a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Il est à usage unique et ne doit être ni restérilisé, ni réutilisé.

Le support pour cornée-donneur a été soigneusement vérifié avant emballage et il est prêt à l'usage lorsque vous le recevez.

## **Conditions de Garantie du Produit**

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication ou altération du matériau jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage. Cependant, si une telle éventualité survenait durant cette période, le vendeur pourra, suivant sa propre option, réparer ou remplacer la pièce défectueuse avec un modèle similaire ou équivalent quant à sa fonction et ses performances, si la pièce incriminée n'est plus en fabrication. TOUTES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, FORMELLES OU IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION ET LA QUALITE SONT EXPRESSEMENT REFUSEES HORMI LES FRAIS DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT CONFORMES AUX TERMES DE CETTE GARANTIE. LE VENDEUR NE SERA RESPONSABLE D'AUCUN PREJUDICE, ET DES DOMMAGES QUI POURRAIENT EN DECOULER, FRAIS OU RESPONSABILITE EN COURUS PAR L'ACHETEUR, PAR SUITE DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE LA NON UTILISATION DE CE PRODUIT.

L'acheteur reconnaît que le produit est destiné à être utilisé uniquement par des personnes compétentes possédant l'habileté nécessaire et l'expérience pour utiliser ce matériel selon la bonne pratique médicale et selon les instructions du fabricant. Lorsqu'il utilise ce produit, l'acheteur accepte d'abandonner tout recours à l'encontre du vendeur concernant un préjudice, des dommages, des frais ou des responsabilités encourus par lui même en raison d'une erreur commise par lui ou par toute autre personne travaillant sous son contrôle.